

FORMANOVA

CLIENTE / Customer :	OPKO HEALTH SPAIN, S.L.U.		
BOZZA DEL / Proof date :			
PRODOTTO / Product :	VISNEUROX OMK1 lett	CODICE / Code :	
CARTA / Paper :	Meccanografica senza legno	GR/MQ / Gr/mq :	50
F.TO POSA STESA / Size flat :	135 x 220	F.TO POSA PIEGATA / Size folden :	28 x 135
STAMPA SU LATO / Printing :	BIANCA / Top side :	<input checked="" type="checkbox"/>	VOLTA / Reverse side : <input checked="" type="checkbox"/>
COLORI / Fold No. :	NERO		
NOTE / Notes :	Leatus:	IXXIXIIIII	(1439)

202240/03

VISneurox®
Omk1

Envase de 10 ml e

Citicolina y Ácido hialurónico

Composición:

Citicolina sal monosódica, ácido hialurónico, fosfato de sodio monobásico monohidrato, fosfato de sodio bibásico dodecahidrato, cloruro sódico, cloruro de benzalconio, agua para inyectables.

Presentación:

Solución oftálmica estéril en envases de 10 ml.

VISNEUROX® OMK1 es una solución oftálmica con un 2% de Citicolina y un 0,2% de ácido Hialurónico de alto peso molecular.

Gracias a la presencia de Citicolina, proporciona un soporte estructural útil y favorable en la reparación de la integridad de las membranas celulares dañadas y también en las patologías oftálmicas degenerativas, como el Glaucoma.

Las soluciones a base de ácido Hialurónico establecen además un microambiente favorable en el proceso de reparación de la superficie ocular en caso que el epitelio corneal y conjuntival estén dañados.

El ácido Hialurónico se obtiene por síntesis biotecnológica y origina soluciones mucomiméticas, mucoadhesivas y viscoelásticas, útiles para mejorar la estabilidad del film lagrimal a fin de mantener la superficie ocular lubricada, hidratada y protegida.

Cuando usarla

VISNEUROX® OMK1, gracias a la presencia de citicolina y a su acción estructural sobre las células ganglionares de la retina, está indicado como coadyuvante en el tratamiento de la hipertensión en pacientes con glaucoma.

Además, las propiedades humectantes y protectoras del producto proporcionan alivio ocular en caso de irritación, ardor y sensación de cuerpos extraños debido a factores ambientales, cirugía ocular o conjuntivitis.

Modo de empleo

1 gota 3 veces al día, según necesidad.

Precauciones y advertencias

- No utilizar si el envase está dañado.
- No usar en caso de incompatibilidad frente a cualquier componente del producto.
- No usar el producto después de la fecha de caducidad indicada en el envase.

- No tocar los ojos con el aplicador del envase.
- Después de la administración puede experimentarse temporalmente visión borrosa. Es conveniente esperar unos segundos antes de emprender cualquier actividad que requiera claridad visual.
- Dejar transcurrir 10-15 minutos después de aplicar el producto antes de administrar medicamentos oftálmicos externos.
- Utilizar el producto en los 30 días después de la primera apertura del envase.
- Mantener el producto fuera de la vista y del alcance de los niños.
- Producto exclusivo para uso oftálmico externo.
- Conservar por debajo de 25°C.
- No arrojar el envase al medio ambiente después de su uso.

Fabricante:

Omikron Italia S.r.l. – Viale B. Buozzi, 5 – 00197 Roma (Italy)

Distribuidor:

OPKO Health Spain S.L.U.

Pl. Europa 13-15, Local 2

08908 L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) Spain

Fecha última revisión: Julio 2017

European Patent n° EP2538918

United States Patent n° US8822429

Japanese Patent n° JP5801324

